



KULIK SYSTEM

WWW.KULIKSYSTEM.COM

**NAKŁADKA PROFILAKTYCZNO -REHABILITACYJNA
KULIK-SYSTEM NA FOTEL LUB KRZESŁO**

INFORMACJE O PRODUKCIE / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU

Przed użyciem zapoznaj się z opisem produktu, instrukcją użytkowania oraz treścią, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych oraz informacje dotyczące używania wyrobu medycznego. Stosowanie podanych wskazówek przy codziennej eksploatacji produktu pozwoli na jego długotrwałe i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie.

Wytwórca: Gabinet Terapii Manualnej i Bioenergoterapii **KULIK SYSTEM®**, PL 31-523 Kraków, ul. Beliny-Prażmowskiego 17/13; Biuro Handlowe **KULIK SYSTEM®**, ul. Kasprowicza 32, tel./fax (+48) 12 411 22 23, tel. +48 12 411 22 32, www.kuliksystem.com, e-mail: biuro@kuliksystem.pl.

Zalecenia: Zaleca się stosowanie produktu w celu prawidłowego ułożenia kręgosłupa na całej długości, jak również zmniejszenia ryzyka powstawania nowych schorzeń kręgosłupa oraz łagodzenia już istniejących.

Zaleca się w szczególności: prostata, hemoroidy, lumbago, zespoły bólowo-korzeniowe (rwa kulszowa, nerwoból międzyżebrowy i zapalenie nerwów międzyżebrowych, rwa barkowa), zespoły bólowe naczyniowo-ruchowe (np. migreny), zniekształcenia kręgosłupa (plecy okrągłe), powiększona kifoza, kręgozmyk, zniekształcenia szyi, zniekształcenia klatki piersiowej (klatka piersiowa lejkowata, klatka piersiowa kurza), w niektórych chorobach zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa. Profilaktycznie zalecana osobom chcącym uniknąć dolegliwości bólowych i zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa.

Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu, skolioza patologiczna, skolioza strukturalna trzeciego stopnia, powiększona lordoza. Przy zniesionej kifozie należy używać tylko siedziska. Osobom mającym inne schorzenia kręgosłupa lub w razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości zaleca się konsultacje u lekarza specjalisty lub chiropraktyka.

Przeciwwskazania dla kobiet w ciąży: Zaleca się.

Wpływ na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i sprawność psychofizyczną: Bardzo dobry.

Efekty uboczne: Nie stwierdzono.

Ograniczenia kontaktu z ciałem: Brak.

Zalecany czas stosowania: Bez ograniczeń.

Niewłaściwe użytkowanie: Producent nie bierze odpowiedzialności za zużycie i wady powstałe podczas niewłaściwego stosowania produktu.

Okres gwarancji: 1 rok od daty zakupu.

Skład: tkanina obiciowa (spandex, welur), pianka poliuretanowa, silikon, taśma elastyczna, guma wysokiej jakości, klamry spinające, regulatory oraz nici.

Sposób czyszczenia i suszenia: Czyścić ręcznie środkami chemicznymi powszechnego użytku, temperatura płynów nie wyższa niż 30°C, suszyć w temperaturze pokojowej.

Odporność na zmienne warunki środowiska: Chronić przed bezpośrednim wpływem warunków zewnętrznych (zamoczenie, wystawianie na słońce, długotrwały wpływ mrozu).

CEL STOSOWANIA:

Wychodząc na przeciw brakowi rozwiązań konstrukcyjnych produkowanych krzesel i foteli, firma **Kulik -System** stworzyła nakładki, które pozwalają (po prawidłowym ich zamontowaniu) uzyskać anatomiczną sylwetkę osoby siedzącej. Na przyjęcie właściwej pozycji ma wpływ umieszczenie guzów kulszowych w wycięciu siedziska (owalny otwór-obniżony), które powoduje, że u osoby siedzącej zdecydowanie zmniejsza się ilość mikrourazów kręgow, męczące napięcia mięśni kręgosłupa, ponieważ w ok 70 % amortyzowane są przez mięśnie ud. Druga część nakładki, przypięta do oparcia fotela wprowadza cały kręgosłup w anatomiczny kształt. Końcówka nakładki, umiejscowiona między naszymi łopatkami, w sposób naturalny "otwiera klatkę piersiową" zwiększając zarazem zasób tlenu w płucach. Poprawia się również praca serca i przepony (jak również mózgu), a mięśnie przykręgosłupowe są delikatnie rozmasowywane. Bardzo dużą zaletą jest też to, że nie naciskamy końcami żeber na narządy wewnętrzne.



**KULIK
SYSTEM**

WWW.KULIKSYSTEM.COM

NAKŁADKA PROFILAKTYCZNO -REHABILITACYJNA
KULIK-SYSTEM NA FOTEL LUB KRZESŁO

INSTRUKCJA MONTAŻU

