

SYSTEM ZDROWEGO SIEDZENIA:

Warunkiem prawidłowego działania Systemu jest poprawne dopasowanie krzesła do sylwetki.



Za pomocą dźwigni po prawej stronie dopasuj wysokość amortyzatora, stopy powinny swobodnie spoczywać na ziemi.



Specjalny kształt siedziska pozwala na **odciążenie guzów kulszowych**, co powoduje powrót miednicy do prawidłowej, fizjologicznej pozycji.

Uwaga: Prosimy pamiętać, że krzesło należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Jest ono przeznaczone dla jednej osoby. Nie wolno na nim stawać. Nie należy pozostawiać w miejscach o dużej wilgotności powietrza czy też w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.

Maksymalne obciążenie dla krzesła wynosi 110 kg.

Demontaż lub montaż jakichkolwiek elementów krzesła może spowodować utratę gwarancji, oraz niewłaściwe działanie medyczne krzesła.

Producent udziela 24 miesięcy gwarancji na elementy mechaniczne oraz wady ukryte powstałe w momencie produkcji.

Reklamacje należy zgłaszać pod nr tel. 0-12 411 22 23 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

System, według którego skonstruowane są nasze krzesła, został zgłoszony w urzędzie patentowym. Krzesła są zarejestrowane jako Wyrób Medyczny w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.



KULIK SYSTEM

WWW.KULIKSYSTEM.COM

**KRZESŁO PROF. REHABILITACYJNE K2
MODEL HANDY I HANDY PRO***

INFORMACJE O PRODUKCIE / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU



KRZESŁO PROF. REHABILITACYJNE KULIK SYSTEM® MODEL HANDY I HANDY PRO* INFORMACJE O PRODUKCIE

Wytwórca: Gabinet Terapii Manualnej i Bioenergoterapii KULIK SYSTEM®, PL 31-523 Kraków, ul. Beliny-Prażmowskiego 17/13; Biuro Handlowe KULIK SYSTEM®, ul. Kasprowicza 32, 31-532 Kraków tel./fax (+48) 12 411 22 23, tel. +48 12 411 22 32, www.kuliksystem.pl, e-mail: biuro@kuliksystem.pl.

Cel stosowania: Taboret ma na celu zarówno profilaktykę jak i czynne bezwysiłkowe działanie zmierzające do przywrócenia właściwego ułożenia miednicy poprzez wybrania na guzy kulszowe oraz kąt nachylenia zastosowany w siedzisku względem podłoża. Taboret stwarza komfortowe warunki podczas siedzenia i zachowuje prawidłowe ułożenie kręgosłupa.

Wskazania:

- osobom pracującym w pozycji siedzącej (stanowiska biurowe, praca przy komputerze)
- dzieciom spędzającym dużo czasu przy komputerze
- dzieciom z wadami postawy
- osobom cierpiącym na bóle i schorzenia kręgosłupa (lumbago, rwa kulszowa i inne zespoły bólowe)

Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu, w razie jakichkolwiek wątpliwości zaleca się konsultacje u lekarza specjalisty lub chiropraktyka.

Efekty uboczne: Nie stwierdzono.

Niewłaściwe użytkowania: Producent nie bierze odpowiedzialności za zużycie i wady powstałe podczas niewłaściwego stosowania produktu.

Okres gwarancji: 2 lata od daty zakupu.

Składniki: Elementy tapicerowane: pianka poliuretanowa wysokoelastyczna, tkanina tapicerska 14% bawełna, 86% poliester. Elementy konstrukcji: tworzywo PP, PE, oraz stal.

Sposób czyszczenia i suszenia: Plamy i zabrudzenia tapicerki należy usuwać za pomocą miękkiej ściereczki oraz roztworu wody i mydła (temp. 30°C), ewentualnie łagodnych środków czyszczących; suszyć w temperaturze pokojowej. Części z tworzyw sztucznych czyścić przy pomocy ogólnodostępnych nierysujących środków czystości.


Uwaga: Nie należy czyścić agresywnymi środkami chemicznymi zawierającymi rozpuszczalniki i wybielacze.

Odporność na zmienne warunki środowiska: Chronić przed bezpośrednim wpływem warunków zewnętrznych (zamoczenie, wystawianie na słońce, długotrwały wpływ mrozu).

Wyrób medyczny. Deklaracja zgodności: Krzesło profilaktyczno-rehabilitacyjne jest zgodne z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (DZ.U, NR 107, poz 679) i jest klasy 1 reguła 1 a wytwórca potwierdza, że postępuje zgodnie z załącznikiem I i IV Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2004 roku w sprawie wymagań zasadniczych dla wyrobów medycznych różnego przeznaczenia.

* Krzesło Handy Pro zawiera podłokietniki.

KRZESŁO PROF. REHABILITACYJNE KULIK SYSTEM® MODEL HANDY I HANDY PRO* INSTRUKCJA MONTAŻU

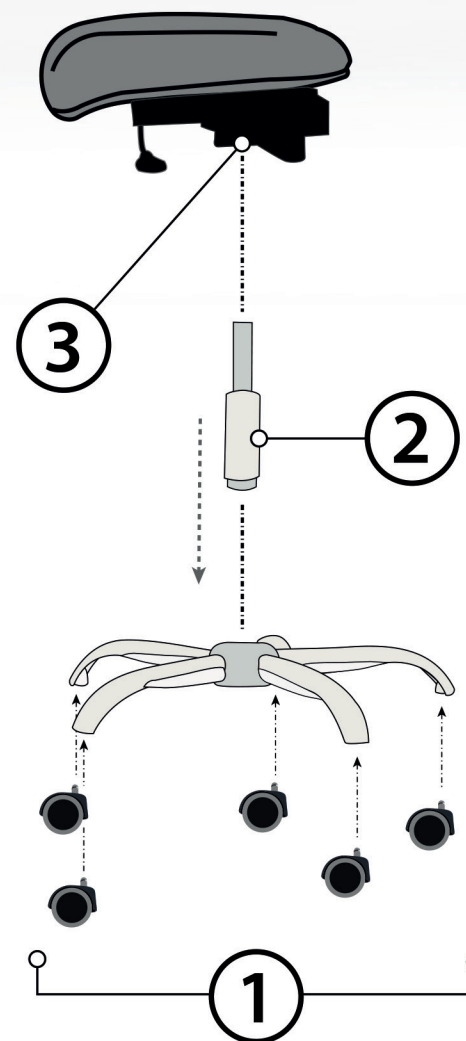

INSTRUKCJA MONTAŻU

1. **Kółka** wcisnąć w otwory podstawy (5szt).
2. Wciskamy **amortyzator** w otwór postawy.
3. Nakładamy **siedzisko wraz z mechanizmem i zamontowanymi podłokietnikami*** na amortyzator lekko dociskając.

* Krzesło Handy Pro zawiera podłokietniki.