

SYSTEM ZDROWEGO SIEDZENIA:

Warunkiem prawidłowego działania Systemu jest poprawne dopasowanie fotela do sylwetki.



REGULACJA
ZAGŁÓWKA



1 Wysokość oparcia:

Podwyższenie oparcia: oburącz chwycić za oparcie i podnożyć je do góry. Na wybranej wysokości puścić oparcie, które zatrzyma się w wybranej pozycji.

Obniżanie oparcia: oburącz chwycić za oparcie, unieść je maksymalnie w górę - oparcie powróci do najniższej pozycji, trzymając oparcie oburącz, ustawić je w bieżącej pozycji.



2 Wysokość siedziska:

Wstań z krzesła, pociągnij dźwignię z prawej strony ku górze (siedzisko będzie się powoli unosić).



3 Kąt nachylenia oparcia i siedziska:

Uruchom mechanizm SYNCHRO przekręcając pokrętkę po lewej stronie do tyłu jednocześnie wywołując nacisk na oparcie, aż do momentu uzyskania określonego odchylenia. Przekręć pokrętkę do przodu aby ustawić oparcie w żądanym położeniu.



4 Regulacja wysokości podłokietnika:

Za pomocą przycisku umieszczonego po zewnętrznej stronie łóżka pod nakładką podłokietnika regulujemy jego wysokość (górną dół).



5 Regulacja oporu odchylenia oparcia:

Odkręcając śrubę po prawej stronie jednocześnie mając odblokowane oparcie, zmniejszysz lub zwiększysz siłę oporu oparcia, dostosowując tym samym krzesło.



6 Wysuw siedziska:

Pociągnij dźwignię po lewej stronie pod siedziskiem ku górze, trzymając dźwignię ustaw siedzisko w żądanej pozycji. Puść dźwignię, siedzisko zablokuje się w wybranej pozycji.

Fotele, ze względu na opatentowany sposób wyprofilowania oparcia **czynnie wymuszają** wyprostowaną pozycję podczas siedzenia. **Specjalny kształt siedziska** pozwala na **odciążenie guzów kulszowych**, co powoduje powrót miednicy do prawidłowej fizjologicznej pozycji.

Uwaga: Prosimy pamiętać, że fotel należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem. Jest on przeznaczony dla jednej osoby. Nie wolno na nim stawać. Nie należy pozostawiać w miejscach o dużej wilgotności powietrza czy też w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła.

Maksymalne obciążenie dla fotela wynosi 130 kg.

Demontaż lub montaż jakichkolwiek elementów fotela może spowodować utratę gwarancji, oraz niewłaściwe działanie medyczne fotela.

Producent udziela 24 miesięcy gwarancji na elementy mechaniczne oraz wady ukryte powstałe w momencie produkcji.

Reklamacje należy zgłaszać pod nr tel. 0-12 411 22 32 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

System, według którego skonstruowane są nasze fotele, został zgłoszony w urzędzie patentowym. Fotele są zarejestrowane jako Wyrób Medyczny w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.

BIURO HANDLOWE KULIK SYSTEM
ul. Cechowa 38 30-614 Kraków



**KULIK
SYSTEM**
WWW.KULIKSYSTEM.COM

KRZESŁO PROFILAKTYCZNO - REHABILITACYJNE
KULIK SYSTEM® MODEL K4 ELEGANCE / K5 GALAXY

INFORMACJE O PRODUKCIE / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU



Przed użyciem zapoznaj się z opisem produktu, instrukcją użytkowania oraz treścią, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych oraz informacje dotyczące używania wyrobu medycznego. Stosowanie podanych wskazówek przy codziennej eksploatacji produktu pozwoli na jego długotrwałe i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie. Wydanie II CZERWIEC 2015.

KRZESŁO PROFILAKTYCZNO - REHABILITACYJNE KULIK SYSTEM® MODEL ELEGANCE / GALAXY INFORMACJE O PRODUKCIE

Wytwórca: Kulik-System Sp. z o.o. Ul. Cechowa 38, 30-614 Kraków, tel: +48 012-411-22-32, www.kuliksystem.com, e-mail: biuro@kuliksystem.pl.

Cel stosowania: Fotel profilaktyczno-rehabilitacyjny ma na celu zarówno profilaktykę, jak i czynne działanie zmierzające do przywrócenia właściwego ułożenia pozycji kręgosłupa. Fotel ten ma na celu przywracanie prawidłowości krzywizn kręgosłupa oraz anatomiczne ułożenie łopatek, wymuszając zachowanie takiego stanu przez cały czas użytkowania.

Wskazania: Zaleca się używanie produktu w celu prawidłowego ułożenia kręgosłupa na całej jego długości jak również zmniejszenia ryzyka powstawania nowych schorzeń kręgosłupa oraz łagodzenia już istniejących. Fotel ten jest przeznaczony dla chorych na lumbago, rwę kulszową i inne zespoły bólowo-korzeniowe, a także dla osób ze zniekształceniami kręgosłupa. Ma on na celu ułatwienie przyjęcia prawidłowej pozycji anatomicznej osobie siedzącej.

Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu, skolioza patologiczna, skolioza strukturalna trzeciego stopnia, powiększona lordoza, osobom mającym inne schorzenia kręgosłupa lub w razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości zaleca się konsultację u lekarza specjalisty lub chiropraktyka.

Efekty uboczne: Nie stwierdzono.

Niewłaściwe użytkownia: Producent nie bierze odpowiedzialności za zużycie i wady powstałe podczas niewłaściwego stosowania produktu.

Okres gwarancji: 2 lata od daty zakupu.

Składniki: Elementy tapicerowane: pianka poliuretanowa wysokoelastyczna, tkanina tapicerska 14% bawełna, 86% poliester. Elementy konstrukcji: tworzywo PP, PE, oraz stal.

Sposób czyszczenia i suszenia: Plamy i zabrudzenia tapicerki należy usuwać za pomocą miękkiej ściereczki oraz roztworu wody i mydła (temp. 30°C), ewentualnie łagodnych środków czyszczących; suszyć w temperaturze pokojowej. Części z tworzyw sztucznych czyścić przy pomocy ogólnodostępnych nierysujących środków czystości.

Uwaga: Nie należy czyścić agresywnymi środkami chemicznymi zawierającymi rozpuszczalniki i wybielacze.

Odporność na zmienne warunki środowiska: Chronić przed bezpośrednim wpływem warunków zewnętrznych (zamoczenie, wystawianie na słońce, długotrwały wpływ mrozu).

Wyrób medyczny: Fotel profilaktyczno-rehabilitacyjny zgodnie z wytycznymi ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. [MDR] z 679) i jest wyrobem medycznym klasy I.

KRZESŁO PROFILAKTYCZNO - REHABILITACYJNE KULIK SYSTEM® MODEL ELEGANCE / GALAXY INSTRUKCJA MONTAŻU



INSTRUKCJA MONTAŻU

1. **Kółka** wcisnąć w otwory podstawy (5szt).
2. Wciskamy **amortyzator** w otwór podstawy.
3. Nakładamy **siedzisko wraz z mechanizmem i zamontowanymi podłokietnikami** na amortyzator lekko dociskając.
4. Łącznik **oparcia** wsuń w szczelinę mechanizmu siedziska i przymocuj je za pomocą trzech śrub z kluczem imbusowym dołączonych do zestawu.