


SYSTEM ZDROWEGO SIEDZENIA:

Warunkiem prawidłowego działania Systemu jest poprawne dopasowanie fotela do sylwetki.

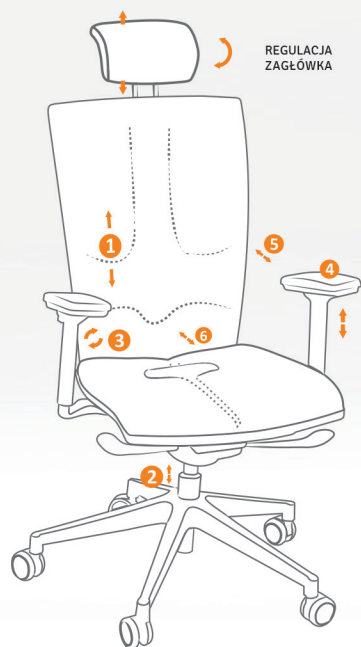

REGULACJA
ZAGŁÓWKI



1 Wysokość oparcia:

Podwyższanie oparcia: oburącz chwycić za oparcie i podnożyć je do góry. Na wybranej wysokości puścić oparcie, które zatrzyma się w wybranej pozycji.

Obniżanie oparcia: oburącz chwycić za oparcie, unieść je maksymalnie w górę - oparcie powróci do najniższej pozycji, trzymając oparcie oburącz, ustawić je w bieżącej pozycji.



2 Wysokość siedziska:

Wstań z krzesła, pociągnij dźwignię z prawej strony ku górze (siedzisko będzie się powoli unosić).



3 Kąt nachylenia oparcia i siedziska:

Uruchom mechanizm SYNCHRO przekręcając pokrętkę po lewej stronie do tyłu jednocześnie wywołując nacisk na oparcie, aż do momentu uzyskania określonego odchylenia. Przekręć pokrętkę do przodu aby ustawić oparcie w żądanym położeniu.



4 Regulacja wysokości podłokietnika:

Za pomocą przycisku umieszczonego po zewnętrznej stronie tóż pod nakładką podłokietnika regulujemy jego wysokość (góra dół).



5 Regulacja oporu odchylenia oparcia:

Przekręcając pokrętkę po prawej stronie jednocześnie mając odblokowane oparcie, zmniejszysz lub zwiększysz siłę oporu oparcia, dostosowując tym samym krzesło.



6 Wysuw siedziska:

Pociągnij dźwignię po lewej stronie pod siedziskiem ku górze, trzymając dźwignię ustaw siedzisko w żądanej pozycji. Puść dźwignię, siedzisko zablokuje się w wybranej pozycji.

Fotele, ze względu na opatentowany sposób wyprofilowania oparcia **czynnie wymuszają** wyprostowaną pozycję podczas siedzenia. **Specjalny kształt siedziska** pozwala na **odciążenie guzów kulszowych**, co powoduje powrót miednicy do prawidłowej fizjologicznej pozycji.

Uwaga: Nie korzystaj z fotela przez więcej niż 1 osobę na raz, nie siedź na krawędzi siedziska, nie stawaj na siedzisku ani nie kłękaj, nie przekraczaj limitów wagowych i pochyleń. Nie przekładaj znacznej części wagi użytkownika do podłokietników podczas siadania \ wstawania, ponieważ naraża je na obciążenia do których nie zostały one przystosowane.

Funkcją podłokietników jest wspieranie przedramienia. Nie należy pozostawiać w miejscach o dużej wilgotności powietrza czy też w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła. Maksymalne obciążenie dla fotela wynosi 130 kg. Demontaż lub montaż jakichkolwiek elementów fotela może spowodować utratę gwarancji, oraz niewłaściwe działanie medyczne fotela.

Producent udziela 24 miesięcy gwarancji na elementy mechaniczne oraz wady ukryte powstałe w momencie produkcji. Reklamacje należy zgłaszać pod nr tel. 0-12 411 22 32 od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.

System, według którego skonstruowane są nasze fotele, został zgłoszony w urzędzie patentowym. Fotele są zarejestrowane jako Wyrób Medyczny w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.



KULIK SYSTEM

WWW.KULIKSYSTEM.COM

KRZESŁO PROFILAKTYCZNO - REHABILITACYJNE
KULIK SYSTEM® MODEL K4 ELEGANCE / K5 GALAXY

INFORMACJE O PRODUKCIE / INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I MONTAŻU



BIURO HANDLOWE KULIK SYSTEM
ul. Cechowa 38 30-614 Kraków



Przed użyciem zapoznaj się z opisem produktu, instrukcją użytkowania oraz treścią, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych oraz inne informacje dotyczące używania wyrobu medycznego. Stosowanie podanych wskazówek przy codziennej eksploatacji produktu pozwoli na jego długotrwałe i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie.

KRZESŁO PROFILAKTYCZNO - REHABILITACYJNE KULIK SYSTEM® MODEL ELEGANCE / GALAXY INFORMACJE O PRODUKCIE

Wytwórca: Kulik-System Sp. z o.o. Ul. Cechowa 38, 30-614 Kraków, tel: +48 012-411-22-32, www.kuliksystem.com, e-mail: biuro@kuliksystem.pl.

Cel stosowania: Fotel profilaktyczno-rehabilitacyjny ma na celu zarówno profilaktykę, jak i czynne działanie zmierzające do przywrócenia właściwego ułożenia pozycji kręgosłupa. Fotel ten ma na celu przywracanie prawidłowości krzywizn kręgosłupa oraz anatomiczne ułożenie łopatek, wymuszając zachowanie takiego stanu przez cały czas użytkowania.

Wskazania: Zaleca się używanie produktu w celu prawidłowego ułożenia kręgosłupa na całej jego długości jak również zmniejszenia ryzyka powstawania nowych schorzeń kręgosłupa oraz łagodzenia już istniejących. Fotel ten jest przeznaczony dla chorych na lumbago, rwę kulszową i inne zespoły bólowo-korzeniowe, a także dla osób ze zniekształceniami kręgosłupa. Ma on na celu ułatwienie przyjęcia prawidłowej pozycji anatomicznej osobie siedzącej.

Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu, skolioza patologiczna, skolioza strukturalna trzeciego stopnia, powiększona lordoza, osobom mającym inne schorzenia kręgosłupa lub w razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości zaleca się konsultację u lekarza specjalisty lub chiropraktyka.

Efekty uboczne: Nie stwierdzono.

Niewłaściwe użytkowania: Producent nie bierze odpowiedzialności za zużycie i wady powstałe podczas niewłaściwego stosowania produktu. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Okres gwarancji: 2 lata od daty zakupu.

Składniki: Elementy tapicerowane: pianka poliuretanowa wysokoelastyczna, tkanina tapicerska 14% bawełna, 86% poliester. Elementy konstrukcji: tworzywo PP, PE, oraz stal.

Sposób czyszczenia i suszenia: Plamy i zabrudzenia tapicerki należy usuwać za pomocą miękkiej ściereczki oraz roztworu wody i mydła (temp. 30°C), ewentualnie łagodnych środków czyszczących; suszyć w temperaturze pokojowej. Części z tworzyw sztucznych czyścić przy pomocy ogólnodostępnych nierysujących środków czystości.

Uwaga: Nie należy czyścić agresywnymi środkami chemicznymi zawierającymi rozpuszczalniki i wybielacze.

Odporność na zmienne warunki środowiska: Chronić przed bezpośrednim wpływem warunków zewnętrznych (zamoczenie, wystawianie na słońce, długotrwały wpływ mrozu).

Wyrób medyczny. Deklaracja zgodności;

- Fotel profilaktyczno-rehabilitacyjny jest zgodny z wytycznymi ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. [MDR] i jest wyrobem medycznym klasy I.
- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.

KRZESŁO PROFILAKTYCZNO - REHABILITACYJNE KULIK SYSTEM® MODEL ELEGANCE / GALAXY INSTRUKCJA MONTAŻU



INSTRUKCJA MONTAŻU

- 1. Kółka** wcisnąć w otwory podstawy (5szt).
- Wciskamy **amortyzator** w otwór podstawy.
- Nakładamy **siedzisko wraz z mechanizmem i zamontowanymi podłokietnikami** na amortyzator lekko dociskając.
- Łącznik **oparcia** wsunąć w szczelinę mechanizmu, tak aby otwory się pokrywały z mechanizmem, ustawić oparcie prosto względem siedziska i przymocować za pomocą śrub dołączonych do zestawu kluczem imbusowym.