



INFORMACJE O PRODUKCIE I INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PAS PROFILAKTYCZKO-REHABILITACYJNY KRZYŻOWO-LĘDŹWIOWY WYSOKI

Przed użyciem zapoznaj się z opisem produktu, instrukcją użytkowania oraz treścią, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych oraz informacje dotyczące używania wyrobu medycznego. Stosowanie podanych wskazówek przy codziennej eksploatacji produktu pozwoli na jego długotrwałe i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie.

Wytwórca: Gabinet Terapii Manualnej i Bioenergoterapii KULIK SYSTEM®, PL 31-523 Kraków, ul. Beliny-Prażmowskiego 17/13; Biuro Handlowe KULIK SYSTEM®, ul. Kasprzowicza 32, tel./fax (+48) 12 411 22 23, tel. +48 12 411 22 32, www.kuliksystem.pl, e-mail: biuro@kuliksystem.pl.

Zalecenia: Zaleca się stosowanie produktu w celu prawidłowego ułożenia kręgosłupa na całej długości, jak również zmniejszenia ryzyka powstawania nowych schorzeń kręgosłupa oraz łagodzenia już istniejących.

Zaleca się w szczególności: Lumbago, kifoza wieku dojrzewania -choroba Scheuermanna, kręgozmyk, skoliozy funkcjonalne, zespoły bólowo-korzeniowe (rwa kulszowa, rwa barkowa, nerwoból międzyżebrowy i zapalenie nerwów międzyżebrowych, dla osób, które chcą ograniczyć ryzyko powstania urazów kręgosłupa.

Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu, skolioza patologiczna, skolioza strukturalna trzeciego stopnia, zniesiona kifoza odcinka piersiowego; powiększona lordoza odcinka lędźwiowego. Osobom mającym inne schorzenia kręgosłupa lub w razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości zaleca się konsultację u lekarza specjalisty lub chiropraktyka.

Przeciwwskazania dla kobiet w ciąży: Nie używać

Wpływ na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i sprawność psychofizyczną: Bardzo dobry.

Efekty uboczne: Nie stwierdzono.

Ograniczenia kontaktu z ciałem: Brak.

Zalecany czas stosowania: 3-5 godzin dziennie.

Niewłaściwe użytkowanie: Producent nie bierze odpowiedzialności za zużycie i wady powstałe podczas niewłaściwego stosowania produktu.

Okres gwarancji: 1 rok od daty zakupu

Skład: materiał ortopedyczny, tkanina bawełniana z domieszką, gumy, plastikowe łączenia, rzepy, fiszbiny, pianka poliuretanowa.

Sposób czyszczenia i suszenia: Prać ręcznie środkami chemicznymi powszechnego użytku przeznaczonymi do tkanin delikatnych w temp. około 40 stopni celcjusza; suszyć w temperaturze pokojowej.

Wyrób medyczny. Deklaracja zgodności: Pas rehabilitacyjny krzyżowo-lędźwiowy wysoki jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami USTAWY z dnia 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych i jest klasy I, reguła 1.

Telefon w sprawie reklamacji: +48 12 411 22 23, +48 604 466 900

System, według którego skonstruowany jest pas został zgłoszony w urzędzie patentowym. Produkt jest zarejestrowany jako Wyrób Medyczny w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA;



1. Pas rehabilitacyjny krzyżowo-lędźwiowy wysoki zaleca się w celu przywrócenia prawidłowości krzywizn kręgosłupa, anatomicznego ułożenia łopatek, wymuszając zachowanie takiego stanu przez cały czas stosowania. W trakcie używania powyższego produktu, można zaobserwować znaczne cofanie się niewielkich deformacji kręgosłupa. Celem jego działania jest utrzymywanie kręgosłupa w jego fizjologicznym położeniu utrzymując właściwe ułożenie odcinka lędźwiowego (zapięcie na rzepach) oraz odcinka krzyżowo-piersiowego. W trakcie noszenia (lub leżenia) duże znaczenie ma lekki masaż mięśni przykręgosłupowych. Usztywniające fiszbiny i wałkowane segmenty wystające ponad poziom łopatek pozwalają również likwidować-zmieniać na właściwy odcinek lordozy szyjnej (tzw. „garb wdowi”). Każde nieprawidłowe pochylenie się czy opuszczenie ramion, zgarbienie sylwetki, zapadnięcie klatki piersiowej albo inna nieprawidłowa pozycja podczas poruszania się czy siedzenia związana jest z reakcją pasa rehabilitacyjnego w postaci odczuwalnego przez użytkownika układu naprężeń. Ciągłe przypomnienie o prawidłowej postawie doprowadza w efekcie do nabrania poprawnych nawyków zachowania prostej i zgrabnej sylwetki, a przede wszystkim do wyeliminowania groźnych dla zdrowia ucisków i naprężeń w kręgosłupie. Codzienne i systematyczne stosowanie daje gwarancję utrzymania właściwej postawy naszych pleców, łopatek, ramion i klatki piersiowej, powodując że ogólny stan zdrowia ulega zdecydowanej poprawie.

2. Pas rehabilitacyjny powinien być dobrany wymiarem do ciała użytkownika, dlatego też przy zakupie należy podać obwód w pasie oraz wzrost. Segmenty boczne powinny trafić w pasie pomiędzy biodra a żebra, natomiast segment grzbietowy (najdłuższy) pomiędzy łopatki. Pasy gumowe łączone rzepami umożliwiają regulację siły nacisku w pasie (lekki docisk).

NUMER REJESTRU WYROBÓW MEDYCZNYCH PL/DR 012091



Kulik-System PL 31-514Kraków
al. Beliny-Prądmowskiego 17/13
12 411 22 23

